



design your body



design your body

» Esistono molte definizioni di bellezza.
Noi pensiamo che sia la combinazione di
salute, benessere e fascino.«

Hypoxi

La rivoluzione nel rimodellamento del corpo.



N


elle pagine seguenti presentiamo la storia dello straordinario successo di Hypoxi, una vera rivoluzione nell'ambito del rimodellamento del corpo. Hypoxi nasce da un'intuizione che si è rivelata geniale ed efficace: combinare gli effetti positivi dei

trattamenti in lipopressione con l'esercizio fisico. Ora, dopo diversi anni di enormi progressi e sviluppi, brevetti e trattamenti di successo, questa idea iniziale ha raggiunto un tale livello di sviluppo e perfezionamento da consentirci di affermare con certezza che nell'ambito del rimodellamento, Hypoxi rappresenta l'unica alternativa non invasiva alla liposuzione.

Il successo di Hypoxi non è arrivato all'improvviso; al contrario, è il prodotto del costante rapporto diretto con i nostri clienti e del continuo sviluppo e perfezionamento della nostra idea e delle nostre apparecchiature, tanto che oggi siamo i primi al mondo nell'ambito dei sistemi di trattamento in lipopressione. In queste pagine siamo orgogliosi di presentare la nostra azienda, i prodotti, la tecnologia, i nostri obiettivi e le nostre idee, perchè tutto ciò ha reso possibile il successo di Hypoxi. Un successo che nasce dalla raccolta e valutazione di migliaia di testimonianze da parte dei nostri clienti in tutto il mondo.

Dr. Norbert Egger, Fondatore di Hypoxy GmbH



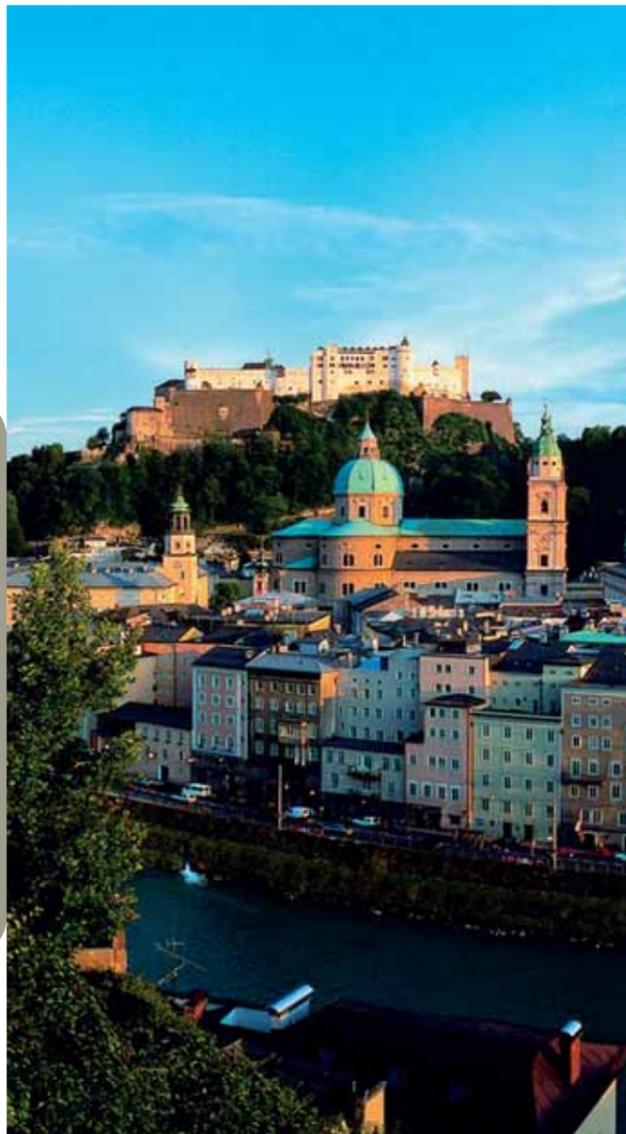

Hypoxi
Da un'idea a un sistema globale.


Pagina 8



Aree problematiche e soluzioni Pagina 10
Ogni lato può diventare il più bello.



Trainer S120 Pagina 16
La medicina migliore per la bellezza delle gambe.

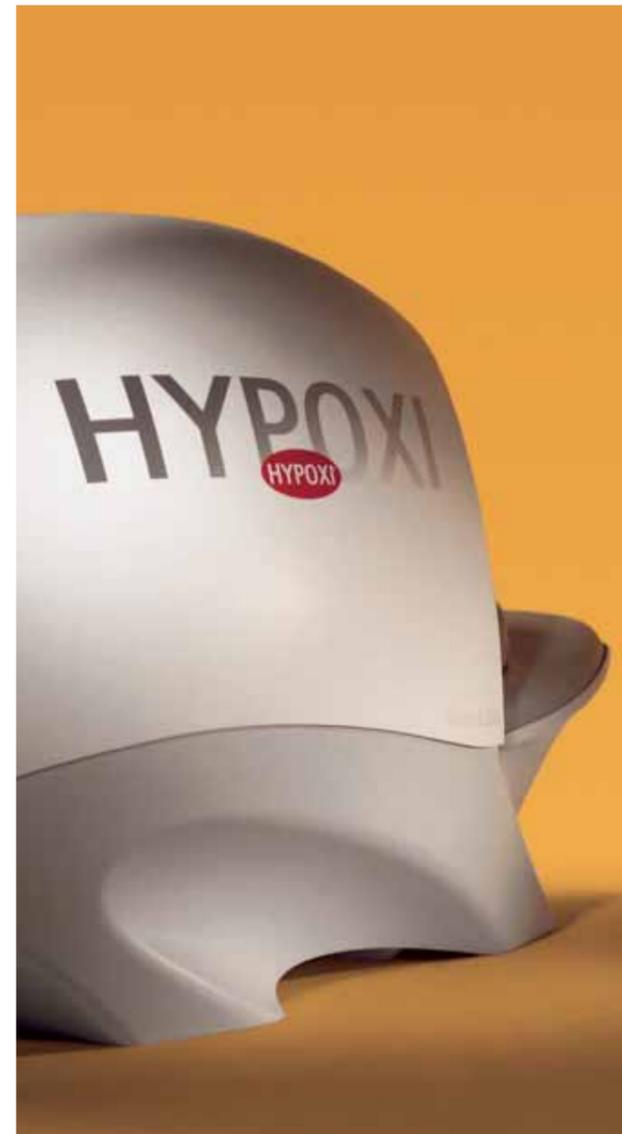

Trainer L250 Pagina 20
Cellulite in fuga.



Vacunaut Pagina 24
La vita in forma perfetta.



HypoxiDermology Pagina 26
Nuova energia per una pelle più soda.


Zone problematiche.



Quando il grasso nei punti critici è un fattore genetico. Se cellulite e pelle atonica sono la nostra regola, cambiamo le regole.

Il problema della cellulite

Cambiamento della temperatura cutanea nelle donne che soffrono di cellulite, dopo 30 minuti di allenamento tradizionale.

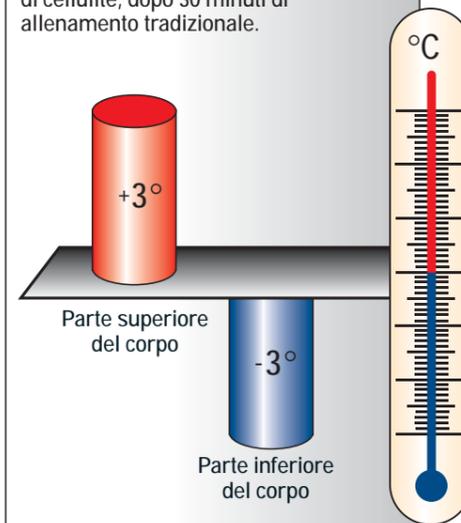

Con l'allenamento tradizionale la parte superiore del corpo si scalda sempre di più perché riceve un migliore apporto di sangue. Pertanto il grasso in questa zona viene ridotto molto più rapidamente rispetto a quello nelle zone problematiche delle gambe e dei glutei. La parte superiore del corpo dimagrisce, mentre cellulite e grasso nella parte inferiore restano immutati.


Fare sport non è sufficiente quando esiste una predisposizione genetica. L'80% delle persone soffre di depositi di grasso persistente in diverse zone del corpo. Lottiamo contro questo problema senza successo perché quando esiste una predisposizione genetica, né dieta né allenamento regolare sono sufficienti a ridurre il grasso nei punti critici.

Il ruolo dell'apporto di sangue nella riduzione del grasso.

L'energia prodotta dalla combustione dei grassi può essere trasportata solo dal sangue, pertanto un efficiente sistema circolatorio è il fattore decisivo nella riduzione del grasso. Migliore è l'apporto di sangue, più semplice e rapida è l'eliminazione del grasso. Perciò, una cattiva circolazione sanguigna impedisce il trasporto dei grassi e quindi la loro eliminazione nelle zone problematiche.

Più la circolazione è lenta, più è difficile combattere i grassi.

Lo smaltimento dei grassi risulta ancora più difficile se una lenta circolazione sanguigna rallenta sia il processo di prelievo dei grassi che il processo di smaltimento dei cataboliti.

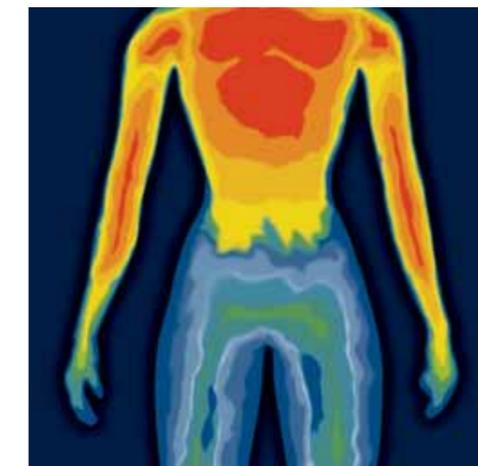

Testare la predisposizione personale.

Scoprire i punti di accumulo dei depositi di grasso persistente nel corpo è facile. Dopo 30 minuti di allenamento (ad esempio corsa o bicicletta) prova a toccare la pelle in diversi punti del corpo. Più fredda è la superficie della pelle, minore è l'apporto di sangue al tessuto. Queste sono le zone dove il grasso risulterà estremamente persistente.



La via d'uscita dalla zona problematica.

Eliminazione mirata dei grassi con Hypoxi.

Massima efficacia nel rimodellamento della figura.

Il trattamento Hypoxi ha risultati quasi immediati: niente di simile era mai stato raggiunto prima.

Per ridurre i grassi è necessario un buon apporto di sangue.

Tutta l'energia – compresi i grassi – viene trasportata nel corpo dal sangue. Il corpo tende a ridurre prima il grasso più facilmente eliminabile – cioè il grasso che si trova nelle zone ben irrorate di sangue.

Il trattamento Hypoxi migliora l'irrorazione sanguigna nelle zone problematiche.

Hypoxi propone una soluzione semplice ma geniale al problema del grasso persistente: l'efficace combinazione di moderato esercizio per l'eliminazione dei grassi e incremento dell'irrorazione sanguigna nelle zone problematiche. Ciò significa che, mentre i muscoli consumano i grassi con l'esercizio fisico, l'incremento dell'irrorazione sanguigna consente al sangue di raggiungere le zone problematiche del corpo attivando i grassi.

Alternare la pressione per ottenere un rapido successo.

La riduzione rapida dei grassi si verifica solo dove la circolazione sanguigna è molto elevata. Hypoxi accelera la circolazione sanguigna e quindi anche la riduzione dei grassi, grazie ad una costante alternanza tra pressione negativa e positiva.

Problemi diversi - soluzioni diverse.

I grassi si accumulano in diversi punti del corpo, in base alla propria predisposizione. Per questo Hypoxi ha sviluppato differenti apparecchiature in grado di trattare efficacemente ogni specifica zona. Alcune agiscono nella zona dell'addome e del giro vita, altre nelle zone dei fianchi, dei glutei e delle cosce.



Durante l'allenamento, l'accumulo di grasso sulla zona di addome e fianchi viene trattato efficacemente da Vacunaut, grazie all'azione innovativa di camere multiple a pressione variabile.



L'accumulo di grassi su gambe e glutei viene trattato con Trainer S120 o Trainer L250: una camera depressurizzata che avvolge il corpo dai fianchi in giù.

I fattori principali per un rimodellamento efficace della figura

- Aumentare l'apporto di sangue mediante pressione negativa
- Attivare la circolazione del sangue mediante l'alternanza di pressione positiva e negativa
- Azione di sostegno alle vene mediante la pressione positiva
- Eliminazione diretta dei grassi mediante una forma moderata di allenamento

HypoxiDermology.

Nuova energia per una pelle più soda.

Una migliore elasticità con HypoxiDermology.

La giovinezza è una questione di pelle.

Pelle soda e liscia senza imperfezioni: questo è il sogno di tutte le donne. Tuttavia negli anni, il tessuto connettivo perde la naturale elasticità e diventa rilassato e atonico. Questo è un processo di invecchiamento naturale, purtroppo, inevitabile.

Un esercizio contro l'invecchiamento della pelle.

Come i muscoli, anche la pelle si può allenare con l'esercizio. Proprio come per i muscoli, il tono della pelle dipende dall'apporto di sostanze nutritive e di ossigeno e dall'eliminazione delle tossine e dei cataboliti. Considerando tutti questi fattori, Hypoxi ha sviluppato HypoxiDermology, un metodo altamente efficace per ringiovanire visibilmente la pelle, con risultati durevoli.

Allenamento delicato ma efficace della pelle.

Per mantenere la pelle sana ed elastica è necessario che il tessuto dermico sia sollecitato regolarmente con una pressione ben mirata. Finora questo si otteneva con il massaggio endodermico o il massaggio di coppettazione. HypoxiDermology combina le proprietà delle due metodologie dando vita ad una tecnica più delicata ed efficace. Tutto questo grazie alle numerose camere multiple a pressione alternata, distribuite uniformemente su tutte le aree problematiche, che stimolano la pelle in maniera dolce ma costante.

Pressione positiva per linfonodi e vene.


Altro fattore importante per i tessuti è l'eliminazione delle tossine e dei prodotti di scarto del metabolismo. La pressione positiva esercitata da HypoxiDermology sui tessuti aiuta a sostenere i linfonodi e le vene, nello svolgimento della loro attività di pulizia. Appena le sostanze dannose sono state allontanate dal tessuto, le nuove sostanze nutritive sono in grado di iniziare la loro azione di rigenerazione e ringiovanimento.

Pressione negativa per attivare il metabolismo.


La pelle, infine, ha sete di ossigeno e di molteplici sostanze nutritive che hanno la funzione di attivare il metabolismo e di sostenere la propria attività nel tessuto. A questo scopo HypoxiDermology utilizza l'effetto di richiamo della pressione negativa. Il sangue richiamato dalla pressione negativa conduce ossigeno e sostanze nutritive nella parte esterna del derma.

L'azione di HypoxiDermology.

Il funzionamento di HypoxiDermology può essere facilmente raffigurabile con un semplice diagramma.

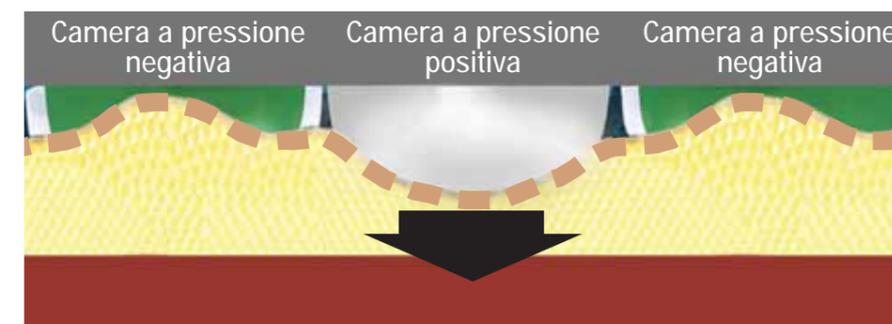


Inizialmente sulla pelle si esercita una delicata azione con pressione positiva e questo favorisce l'eliminazione delle tossine.

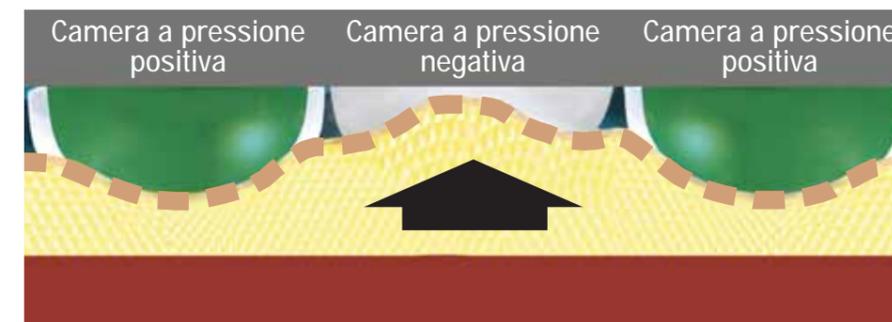

Nella seconda fase la pelle viene richiamata mediante pressione negativa e in questo modo viene alimentata dal sangue con ossigeno e altre sostanze nutritive.

Tessuto Grasso Muscolo Pelle

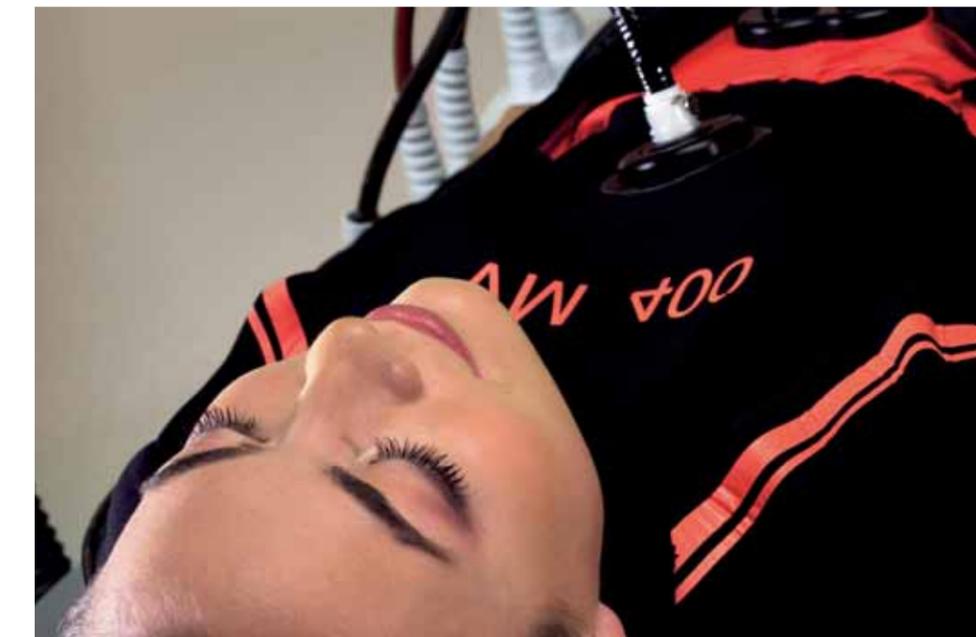

Le indicazioni per un efficace lifting della pelle

- Regolare esercizio del tessuto dermico
- Disintossicazione e purificazione mediante pressione positiva
- Apporto di sostanze nutritive mediante pressione negativa

Trainer S120.



La medicina migliore per la bellezza delle gambe.

Trainer S120 - efficace anche nei casi più difficili.

Tre trattamenti combinati in un unico apparecchio.

Il Trainer S120 è un apparecchio di allenamento e trattamento di nuova generazione. Combina, infatti, tre diverse forme di trattamento, ciascuna delle quali è di grande efficacia.

Allenamento e trattamento.

L'esercizio fisico è il punto focale del trattamento con Trainer S120. Il cicloergometro integrato soddisfa i più alti standard di qualità ed è efficace sia sul versante dell'eliminazione dei grassi, che in quello della rigenerazione sportiva.

Pressione negativa - trattamento di richiamo.

La pressione negativa richiama il flusso del sangue nel derma e nel tessuto grasso e quindi attiva la circolazione sanguigna, il metabolismo e l'apporto di sostanze nutritive in quest'area.

La pressione negativa è una condizione preliminare imprescindibile per lo smaltimento dei grassi nei punti critici.

Pressione positiva - trattamento di compressione.

La pressione positiva allontana il sangue e i liquidi corporei dal derma e dal tessuto grasso e ne accelera lo smaltimento.

In questo modo si ha un'azione positiva anche sulle vene e i linfonodi. Inoltre è consigliabile per chi ha una maggiore necessità di eliminare ristagni linfatici accumulati nei muscoli delle gambe in seguito a lesioni o affaticamento fisico.





Uso estetico.

Trainer S120 è la soluzione più efficace in tutti i casi in cui si desideri un'eliminazione efficace e mirata dei grassi. La funzione di pressione negativa garantisce la perdita di peso nelle zone problematiche. Inoltre, la funzione di pressione positiva ha un'azione di sostegno sulle vene e i linfonodi.

Funzione di recupero dopo prestazioni sportive impegnative.

La funzione di pressione positiva del Trainer S120 ha un'azione analoga a quella del linfodrenaggio o della ginnastica acquatica. È quindi particolarmente indicata per accelerare la fase di recupero grazie all'eliminazione dell'acido lattico e dei cataboliti nei muscoli particolarmente affaticati.

Uso terapeutico in medicina.


Il Trainer S120 è certificato dal punto di vista medico e tecnico secondo le normative EN 93/42/CEE. Inoltre, dispone di funzioni terapeutiche multiple, assimilabili al linfodrenaggio o alla coppettazione. Pertanto il Trainer S120 è utilizzabile come complemento o come unico trattamento, in tutti i casi in cui si ritenga opportuno utilizzare la combinazione delle due metodologie.

Trainer S120 - Tecnologia.

Il Trainer S120 è un apparecchio per l'allenamento dotato di una cabina depressurizzata che racchiude il corpo dalla vita in giù. Si utilizza stando seduti ed è dotato di una funzione di pressione negativa ed una positiva.

Componenti dell'apparecchiatura Trainer S120:

- Guscio esterno di precisione in PU sigillante
- Cicloergometro con freni magnetici
- Controllo computerizzato completamente automatico
- Trasferimento dei dati corporei come temperatura della pelle e polso mediante trasmissione radio
- Regolazione automatica del trattamento quando si abbandona la zona di allenamento ottimale
- Programmazione individuale in base al tipo di problematica
- 9 programmi fissi standard con funzione di avvio rapido
- Display grafico del programma
- Display grafico della curva della temperatura
- Programma di valutazione della curva della temperatura
- Dispositivo automatico di blocco pneumatico
- Blocco di sicurezza controllato dall'inziatore
- Svitaggio di sicurezza e apertura del dispositivo
- Regolazione a motore dell'altezza del sedile
- Regolazione elettrica del cicloergometro

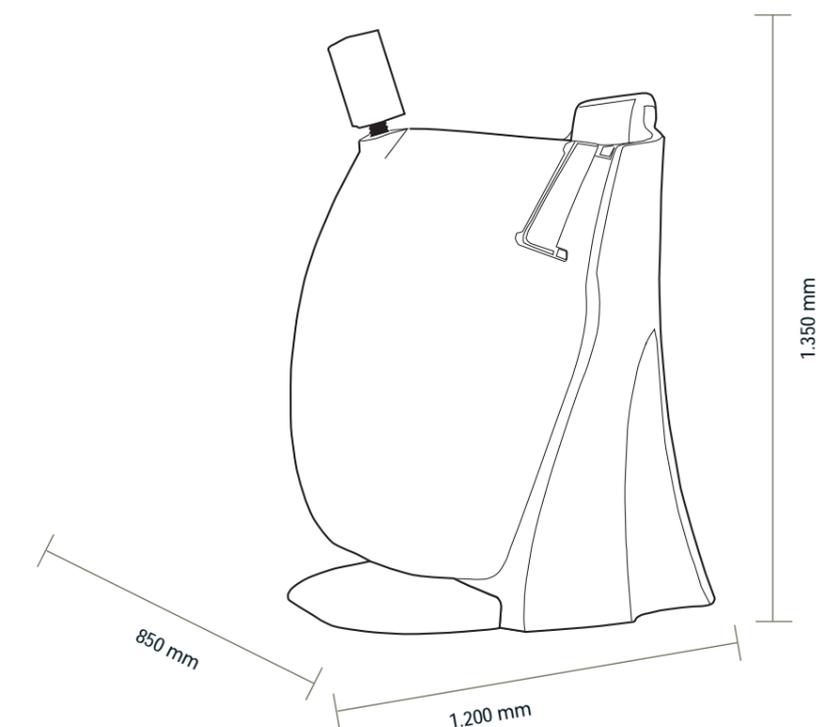

Dati tecnici:

Lunghezza: 1.200 mm
Larghezza: 850 mm
Altezza: 1.350 mm
Peso: 180 kg

Cabina: costruzione isolante 10 – 50 mm di spessore con tecnologia integrata

Compressore: compressore a pressione negativa, non richiede manutenzione, a bassa rumorosità, regolabile

Capacità: Pressione negativa 40 mBar
Pressione positiva 40 mBar

Alimentazione elettrica: 230 V / 50 Hz / 200 VA

Spazio richiesto:
Lunghezza: 1.600 mm
Larghezza: 1.500 mm
Altezza: 2.000 mm

Trainer L250.



La cellulite se la dà a gambe.

Trainer L250 - tecnologia moderna, risultati eccellenti.

Gambe in perfetta forma - senza fatica e con risultati duraturi.

Il "cuore" del rivoluzionario sistema Hypoxi è una cabina a depressurizzazione variabile che racchiude la parte inferiore del corpo ed è dotata di un lettino completo di cicloergometro.

Posizione comoda.

L'esercizio è fondamentale nell'eliminazione dei grassi. Il Trainer L250 consente di esercitarsi comodamente, da sdraiati. Questo consente un allenamento moderato e adatto a tutti, qualunque sia il peso corporeo della persona.


Pressione negativa dinamica per il massimo apporto sanguigno.

Durante il trattamento, la pressione negativa dinamica agisce sulle zone problematiche delle gambe e dei glutei. In base alle problematiche individuali viene impostato un programma di trattamento che si basa sulla costante alternanza tra pressione negativa e pressione normale. Questa variazione di pressione accelera la riduzione dei grassi e dà sostegno alla circolazione periferica.

L'azione dalla forza di gravità.

La posizione sdraiata e la pedalata verso l'alto consente di sfruttare la forza di gravità per favorire il drenaggio dei liquidi dalle gambe, in modo sano e naturale.

La posizione supina consente di allenarsi in tutta comodità senza l'affaticamento della schiena.

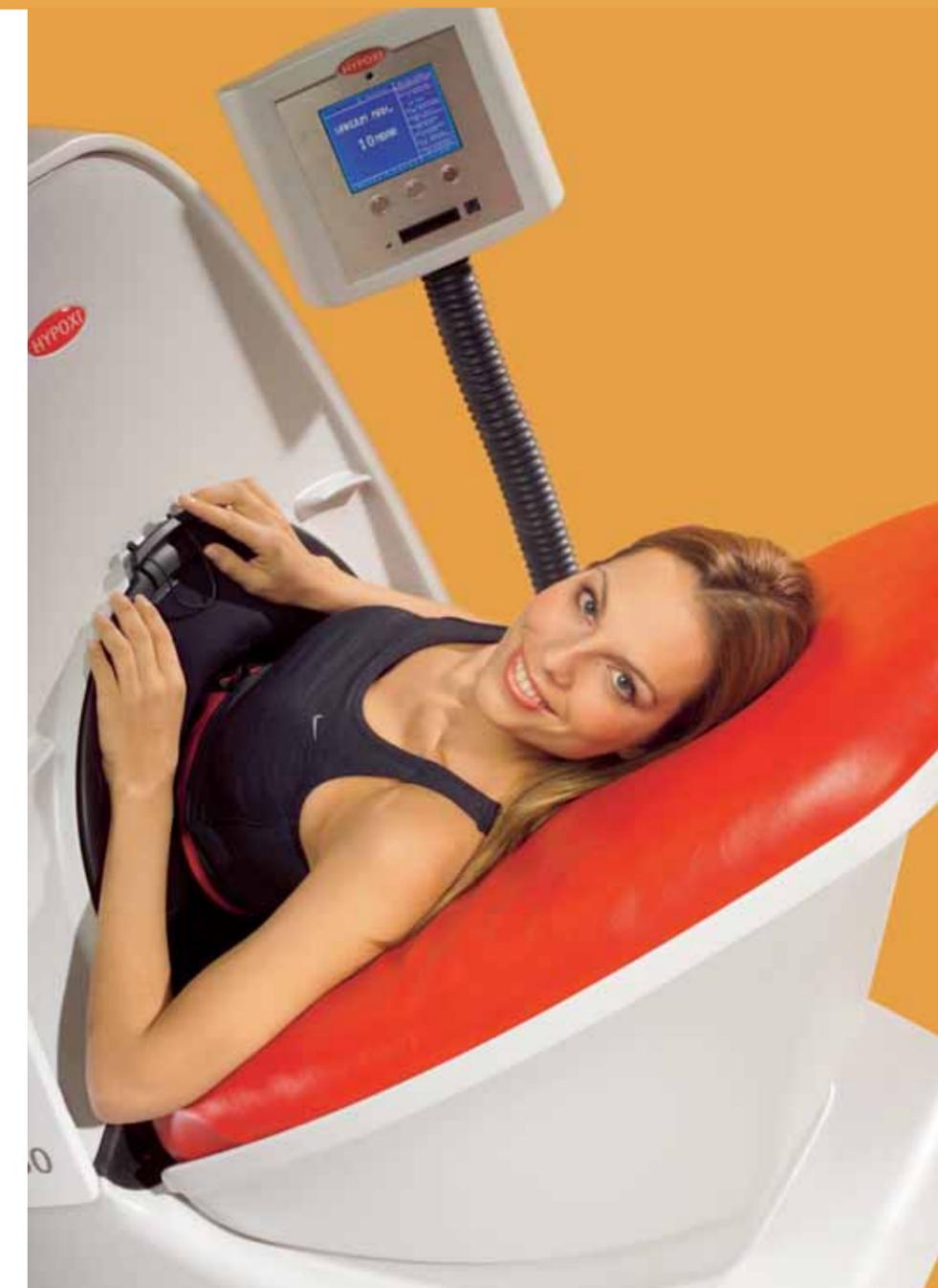



L250 è composto da una camera a pressione negativa con cicloergometro integrato.

La posizione supina allevia il corpo dal proprio peso. Inoltre la gravità naturale stimola lo smaltimento dei liquidi tissutali: il sangue viene arricchito di acidi grassi e i liquidi corporei immagazzinati nel tessuto dermico vengono drenati più efficacemente, rendendo più profonda l'azione di eliminazione dei grassi.

Perdita di grasso mirata su gambe e glutei

- Posizione supina, ideale per la schiena
- Trattamento dinamico con pressione negativa
- Comodo, sano, efficace.



Trainer L250 - Tecnologia.

Il Trainer L250 è un apparecchio che viene utilizzato in posizione supina ed è dotato di una cabina depressurizzata che racchiude il corpo dalla vita in giù. La camera a pressione negativa è chiusa ermeticamente intorno alla vita e la pressione negativa è controllata dinamicamente da un computer.

Componenti dell'apparecchiatura Trainer L250:

- Guscio esterno di precisione in PU
- Cicloergometro con freni magnetici
- Controllo computerizzato completamente automatico
- Trasferimento dei dati corporei, come temperatura della pelle e polso mediante trasmissione radio
- Regolazione automatica del trattamento quando si abbandona la zona di allenamento ottimale
- Programmazione individuale in base al tipo di problematica
- Apertura elettrica del guscio superiore
- Regolazione elettrica dello schienale
- Regolazione elettrica del cicloergometro
- Blocco magnetico del dispositivo di avvvitamento superiore a vuoto
- Programmi fissi standard con funzione di avviamento rapido
- Possibile apertura manuale in caso di interruzione dell'alimentazione
- Sigillatura variabile per adattamento del corpo individuale
- Funzionamento sicuro grazie al controllo dell'iniziatore
- Correzione del programma e della posizione in qualsiasi momento
- Programmazione su terminale o mediante telecomando



Dati tecnici:

Lunghezza: 2.500 mm (aperto 2750 mm)
Larghezza: 900 mm
Altezza: 1.250 mm, altezza da aperto: 2.000 mm
Peso: 160 kg

Cabina: costruzione guscio 10 - 50 mm di spessore con tecnologia integrata

Compressore: compressore a pressione negativa, non richiede manutenzione, a bassa rumorosità, regolabile

Capacità: pressione negativa 40 mbar

Alimentazione elettrica: 230 V / 50 Hz / 200 VA

Spazio richiesto:

Lunghezza: 2.800 mm, Larghezza: 1.800 mm, Altezza: 2.000 mm



La vita in forma perfetta.

Vacunaut - il metodo per un addome piatto.

Moderato esercizio associato a due fasi di pressione contraria.

Una fascia con 122 camere a pressione avvolge le zone problematiche di addome, vita e fianchi. Durante l'allenamento moderato, ognuna di queste camere svolge un'azione di pressione negativa e una di pressione positiva ad intervalli ritmici.

Fase di pressione negativa.

Nella fase di pressione negativa il sangue viene richiamato nel tessuto grasso sub-dermico dell'addome e dei fianchi ed arricchito degli acidi grassi attivati dalla forma moderata di allenamento. Contemporaneamente il tessuto viene arricchito di sostanze nutritive fresche e di ossigeno.

Fase di pressione positiva.

Nella fase di pressione positiva il sangue arricchito di acidi grassi viene sospinto dal tessuto grasso nel flusso sanguigno. Insieme all'eliminazione degli acidi grassi, altre sostanze dannose e le tossine vengono allontanate dal tessuto. Nella fase di pressione positiva si accelera il trasporto degli acidi grassi attraverso il flusso sanguigno ai muscoli, dove sono bruciati definitivamente.

Allenamento degli addominali integrato.

Durante l'allenamento, anche gli addominali e i muscoli dei fianchi sono sollecitati automaticamente. Il continuo alternarsi di pressione negativa e positiva stimola automaticamente i contrattori addominali, con un conseguente effetto di tonificazione muscolare. La posizione eretta durante il trattamento garantisce un corretto allenamento isometrico degli addominali e nel contempo previene l'affaticamento della colonna vertebrale.

Vacunaut - Tecnologia.


Vacunaut è composto da una muta a tenuta stagna con un sistema integrato di attivazione dei grassi intorno alla zona di addome e fianchi, da una colonna tecnica con un sistema di controllo computerizzato e da un compressore integrato. Quest'ultimo viene regolato da una colonna operativa elettronica per il controllo accurato del trattamento. La tuta a pressione negativa è idonea per esercizi su qualunque normale apparecchio di allenamento cardiovascolare, come cicloergometri, tapis roulant, stepper o cross trainer.

I componenti tecnici della tuta Vacunaut:

- Tuta a pressione negativa di neoprene ermetico
- Camere a pressione PU integrate
- Disposizione delle camere a pressione per diversi tipi di figura
- 122 camere a pressione per uomini
- 110 camere a pressione per donne
- Tutte le camere di attivazione con funzione di pressione positiva e negativa

I componenti tecnici della colonna Vacunaut:

- Guscio di precisione in PU
- Controllo computerizzato completamente automatico
- Connessioni integrate per tubi
- Contenitore sudore
- Contenitore di bilanciamento della pressione integrato
- Tubi a pressione con attacco rapido
- Rivestimento per assorbimento sonoro delle pompe
- Ruote per il trasporto
- Connessioni aggiuntive per HypoxiDermology

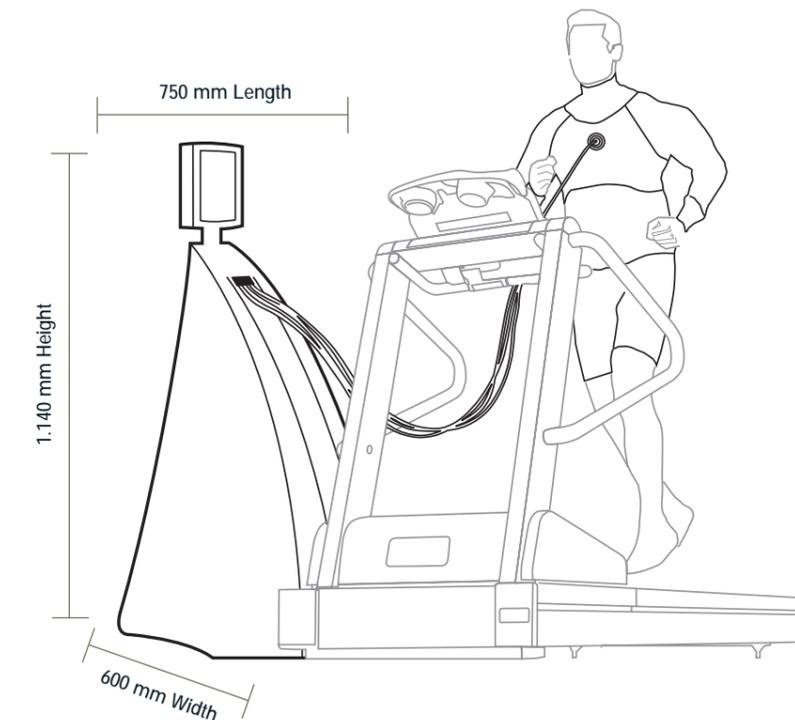

Dati tecnici:

Dimensioni colonna tecnica:

Lunghezza: 750 mm
Larghezza: 600 mm
Altezza: 1.140 mm

Peso colonna tecnica: 54 kg
Peso tuta a vuoto: 2,5 kg

Cabina: costruzione piastra di acciaio con tecnologia integrata

Compressore: pompa rotante / 0,18 kW

Capacità: Pressione negativa 300 mbar
Pressione positiva 350 mbar

Alimentazione: 230 V / 50 Hz / 200 VA

Spazio richiesto:

Lunghezza: 2.500 mm, larghezza: 1.700 mm, altezza: 2.000 mm

HypoxiDermology Comfort.



Nuova energia per una pelle più soda.

HypoxiDermology.


Un principio naturale perfezionato da Hypoxi.

Con l'aiuto della moderna tecnologia, Hypoxi ha portato la terapia naturale della coppettazione nel ventunesimo secolo. L'effetto lifting che HypoxiDermology ottiene sulla pelle è impareggiabile e i miglioramenti sono visibili sin dalle prime applicazioni. HypoxiDermology agisce sulla zona interessata 200 volte più a lungo rispetto al massaggio di coppettazione manuale. Pertanto il massimo effetto inizia già dopo 20 minuti di trattamento.

HD 400 Comfort applica perfettamente un metodo olistico raggiungendo standard eccellenti nella qualità del trattamento e dei risultati. L'apparecchiatura tecnica e una speciale pompa anti-rumore sono entrambe integrate nel comodo lettino di trattamento.


Fase 1

I liquidi corporei, i prodotti di scarto delle cellule e i prodotti finali del metabolismo vengono spinti fuori dal derma e dal tessuto grasso mediante una delicata azione esercitata dalla pressione positiva.

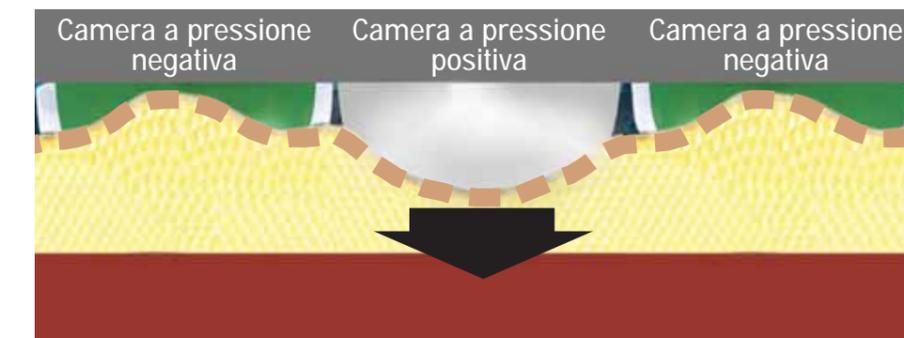

Fase 2

La pressione negativa richiama il sangue fresco, saturo di ossigeno e di sostanze nutritive, nel tessuto. Questa azione viene ripetuta costantemente durante l'intero trattamento.

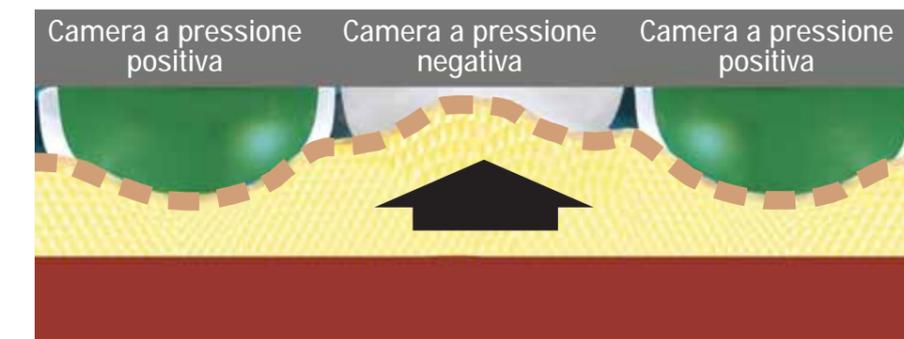

Tessuto Grasso Muscolo Pelle



HypoxiDermology Comfort – tanti vantaggi in pieno comfort.

HD Comfort non eccelle solo per lo straordinario design e la tecnologia ultra-moderna, ma anche per la sua speciale funzionalità. La posizione inclinata del corpo, infatti, ottimizza l'azione del trattamento e garantisce un riflusso ottimale dei liquidi tissutali, favorendone il trasporto verso i reni e la vescica.

I tubi di collegamento alla tuta si possono alloggiare nel lettino in modo che questo risulti completamente libero, facilitando così il processo di avvio di ogni singolo trattamento. La pompa a vuoto e le valvole di commutazione sono schermate da un rivestimento anti-rumore, in modo da favorire il relax totale durante il trattamento.



HypoxiDermology è il modo più comodo di migliorare la forma, completamente rilassati. La pelle viene sollecitata e allenata senza muovere un muscolo. Inoltre, grazie alle 400 camere di attivazione integrate, l'allenamento agisce esattamente dove previsto: sulla pelle.

HD Comfort - Tecnologia.


HD Comfort è un letto di trattamento a tecnologia integrata con un pannello comandi per il controllo del trattamento di HypoxiDermology. L'imbottitura del lettino conferisce caratteristiche ergonomiche di grande funzionalità e comodità.

I componenti dell'apparecchiatura di HD Comfort:

- Guscio di precisione in PU
- Imbottitura d'appoggio ergonomica
- Regolazione elettrica dello schienale
- Tubi di collegamento a scomparsa
- Pannello comandi per il controllo automatico del trattamento
- Massima riduzione sonora per mezzo di doppi serbatoi

I componenti tecnici della tuta HD:

- Tuta completa stagna in neoprene/PU
- 400 camere di attivazione integrate
- Tutte le camere di attivazione con funzione negativa e positiva
- Tuta unisex che veste 6 diverse taglie

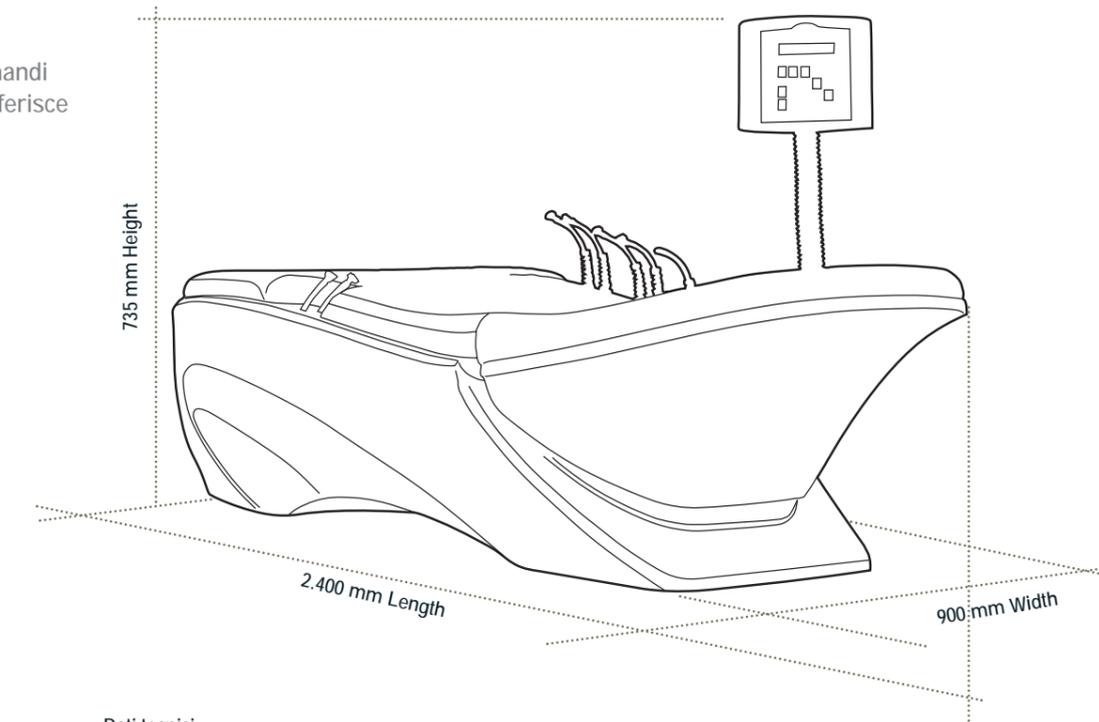

Dati tecnici:

Lunghezza: 2.400 mm
Larghezza: 900 mm
Altezza: 735 mm

Peso: 110 kg
Peso tuta a vuoto: 4,1 kg

Cabina: guscio di precisione 10 – 50 mm di spessore con tecnologia integrata

Compressore: pompa rotante / 0,18 kW

Capacità pressione negativa: 300 mbar
Capacità pressione positiva: 350 mbar

Alimentazione elettrica: 230 V / 50 Hz / 200 VA

Spazio richiesto:
Lunghezza: 2.700 mm, larghezza: 1.700 mm, altezza: 2.000 mm

HD Comfort



Trainer S120



Trainer L250



Vacunaut



design your body



design your body

Hypoxi Italia

Via dei Pestagalli 27 - 20138 Milano

Telefono: 02 502970 - Fax: 02 58019698

Email info@hypoxi.it - www.hypoxi.it