

PSE



*Le PSE est un véritable outil professionnel alliant performance
et facilité d'utilisation, le tout à un prix très accessible.*

PSE

Pulstar Technology



Source de légèreté



Starvac Italia

Via dei Pestagalli 27 - 20138 Milano

www.starvac.it

info@starvac.it

info line: 02-502970



Pulstar PSE è studiato specificatamente per il trattamento degli arti, con massaggi drenanti per dare un risposta efficace in tutti i casi di rallentamento della circolazione linfatica e/o venosa con ristagni di liquidi a causa di sensazioni dolorose ed inestetismi.

Pulstar PSE è un apparecchio che applica il trattamento di pressione con doppio gradiente fisiologico per ottenere i migliori risultati alle gambe, addome e braccia.

Pulstar PSE applica questa esclusiva tecnologia nel campo del drenaggio venoso-linfatico per trattare le gambe pesanti, le insufficienza del sistema venoso-linfatico come cura e profilassi degli inestetismi della cellulite.



Beauty & Medical Innovations



Starvac Italia

Via dei Pestagalli 27 - 20138 Milano


www.starvac.it

info@starvac.it

info line: 02-502970

PULSTAR PSE

Il trattamento consiste nell'inserire le gambe o le braccia in gambali o bracciali divisi in più settori che si gonfiano progressivamente e poi si svuotano. Questa alternanza di pressione e depressione provoca un massaggio unico nel suo genere, utilizzato per fini medici, ma anche estetici.

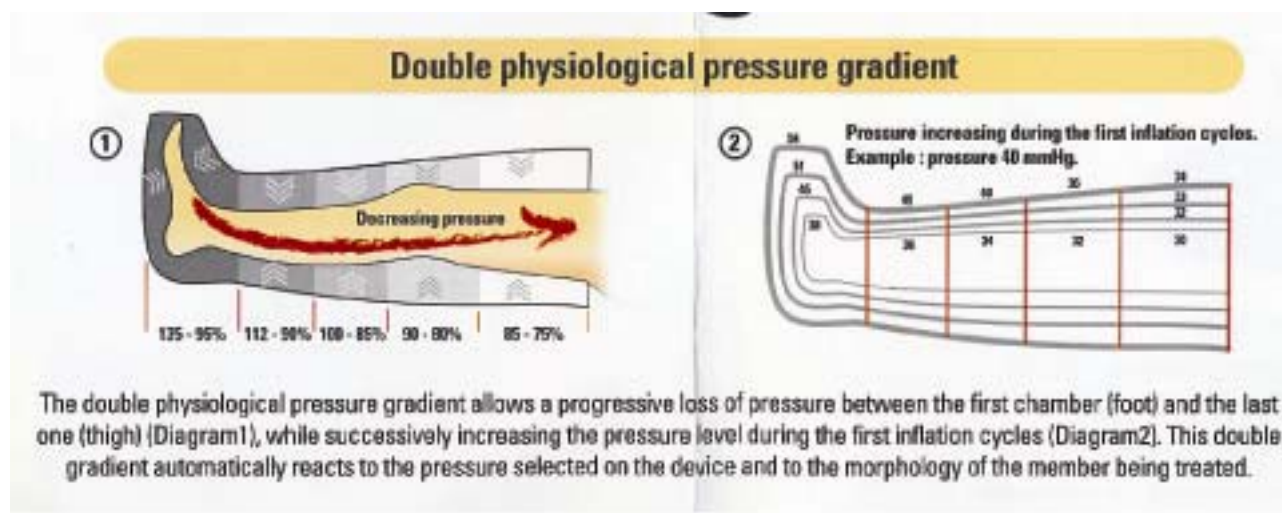

Doppio gradiente di pressione fisiologica:

Pulstar PSE è costruito sul brevetto originale di Pulstar a doppio gradiente di pressione fisiologica. La tecnologia applicata genera una diminuzione progressiva della pressione tra ogni settore del gambale di trattamento.

Questa modalità genera un trattamento simile all'azione delle mani di un fisioterapista e impedisce l'effetto del "laccio emostatico" che può essere provato usando altri dispositivi di presso-massaggio senza la funzione del gradiente.

Il doppio gradiente della pressione fisiologica è la diminuzione progressiva della pressione tra il primo settore (piede) e l'PSE mo settore (coscia) (diagramma 1), mentre successivamente aumenta il livello di pressione dopo il primo ciclo di gonfiamento (diagramma 2). Questo doppio gradiente si genera automaticamente in funzione della regolazione della pressione e della morfologia della gamba.

Starvac Italia

Via dei Pestagalli 27 - 20138 Milano

www.starvac.it


info@starvac.it

info line: 02-502970

Double physiological pressure gradient treatment accessories


5-chamber boot

Lower limbs treatment. Length: 95cm.
Thigh circumference: up to 75cm.

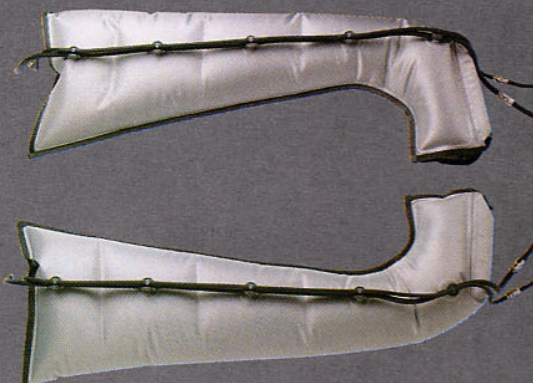

2-chamber belt + boot connections

Hips, abdomen and buttocks treatment.
Length: 110cm.
Height: 36cm.

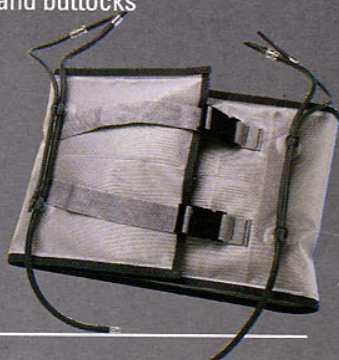

4-chamber sleeve

Upper limbs treatment. Upper limb
secondary lymphoedema. Length: 70cm.
Circumference: up to 62 cm.



Accessori per il trattamento:

Corredo Standard:

- Gambale a 5 settori: per il trattamento delle membra inferiori.
Lunghezza : 95cm.
Circonferenza della coscia: fino a 75 cm

Accessori opzionali:

- Fascia addominale a 2 settori + collegamenti gambali: da utilizzare per il trattamento delle anche, dell'addome e delle natiche.
Lunghezza : 110 cm
Altezza : 36 cm
- Bracciale a 4 settori: per il trattamento dei membri superiori.
Lunghezza : 78 cm
Circonferenza : fino a 62 cm

Controindicazioni:

- Trombosi dei vasi venosi
- Infezioni (erisipela, linfangite)
- Arteriopatie gravi (3° e 4° stadio)
- Insufficienza cardiaca non trattata
- Emofilia
- Fragilità capillari
- Gravidanza

Caratteristiche tecniche:

- Lunghezza : 28cm
- Larghezza : 24 cm
- Altezza : 12 cm
- Peso : 3,7 Kg
- Pressione : 20 a 80 mmhg
- Tensione da alimentazione: 220V/50-60 Hz/50W

Starvac Italia

Via dei Pestagalli 27 - 20138 Milano

www.starvac.it

info@starvac.it

info line: 02-502970