

Questi sono i punti di forza di EuraFace TOTAL ACTION REVOLUTION  
**Scoprirete quali vantaggi vi porterà**



**Perché EuraFace Total Action Revolution?**

Il mercato dell'estetica è diventato ancora più competitivo e offre sempre più tecnologie simili, uniformando la professionalità dell'estetista.

Abbiamo deciso di offrire una tecnologia polivalente che si concentra sui trattamenti viso, con una varietà di funzioni tale da poter affrontare qualsiasi inestetismo e dare alle estetiste l'opportunità di ampliare la loro professionalità.

Ecco che per le estetiste è il **MOMENTO GIUSTO** per investire in tecniche sicure e efficienti, ma soprattutto **CONVENIENTI** e **REDDITIZIE**: l'obiettivo è quello di diversificare e fornire nuovi servizi, in modo da mantenere e fidelizzare i clienti esistenti e attrarne di nuovi.

## 1. Punto di forza di TOTAL ACTION REVOLUTION: La personalizzazione del trattamento

**EuraFace Total Action Revolution** offre la possibilità di ottimizzare il trattamento per mezzo di 10 funzioni, che possono essere usati da soli o in abbinamento tra loro, per offrire soluzioni estetiche personalizzate in base alle caratteristiche della pelle e il risultato desiderato.



Corrente continua  
transdermica



Stimol



Moisture  
control



Micro  
dermoabrasione



Thermo RF  
Current



Microcurrent  
Lifting



Massaggio  
AirDren



Ultrasuoni 25 kHz



Alta  
Frequenza



Scrub-Brush

## 2. Punto di forza di TOTAL ACTION REVOLUTION: **L'ossigenazione e la tonicità dei tessuti**

Manipolo: Scrub-Brush

L'azione meccanica del manipolo Scrub-Brush per effetto della rotazione della spazzola, converte lo stimolo meccanico in attività biochimica, generando la risposta delle cellule per effetto del maggior apporto di ossigeno ai tessuti, grazie all'aumento della microcircolazione sanguigna e linfatica. Trattamento ideale per un effetto detossinante.



### 3. Punto di forza di TOTAL ACTION REVOLUTION: **Ringiovanimento cellulare fisiologico** Spatola ultrasuoni 25kHz


L'azione del manipolo ad ultrasuoni a 25 kHz per effetto delle onde biodinamiche vibrazionali, permette di ottenere le seguenti azioni:

- ✓ Iperemia tissutale endogena: Stimolazione e rigenerazione delle cellule epidermiche.
- ✓ Sensazione di benessere istantaneo.
- ✓ Uniformità del colorito cutaneo.
- ✓ Vibro massaggio: Stimolazione dei fibroblasti, produzione delle fibre di collagene, di elastina e di acido ialuronico.
- ✓ Esfoliazione meccanica vibrazionale: Riduce lo strato corneo per una pelle più luminosa, liscia e detossinata.
- ✓ Veicolazione transdermica: Funzione ionoforetica dei funzionali contenuti nei cosmetici.



#### 4. Punto di forza di TOTAL ACTION REVOLUTION: **Azione diatermica** Manipolo: Thermo RF Current

L'azione diatermica della funzione Thermo RF Current genera il riscaldamento degli strati superficiali della cute, senza surriscaldarli in profondità, stimolando la produzione di elastina e collagene. Trattamento ideale per una tonificazione cutanea ottimale, e per un rapido effetto lifting ridensificante.

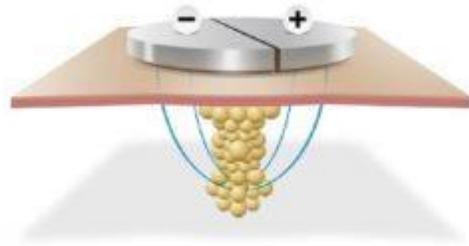

## 5. Punto di forza di TOTAL ACTION REVOLUTION: **Tonificazione dei tessuti muscolari** Manipolo: Stimol

Il manipolo Stimol genera dei micro impulsi, provocando mini contrazioni muscolari che recuperano l'atonia dei tessuti, donando un aspetto della pelle più tonico. Trattamento ideale per un effetto Anti Age tonificante e per ridefinire l'ovale del viso.



## 6. Punto di forza di TOTAL ACTION REVOLUTION: **Veicolazione transdermica profonda**

Funzione: Corrente continua transdermica

L'azione della corrente continua transdermica generata dal manipolo, migliora la veicolazione transdermica dei funzionali contenuti nei cosmetici, ottenendone la maggiore assimilazione da parte dei tessuti cutanei per risultati evidenti con minori sedute. Trattamento ideale per attenuare le micro rughe, idratare e illuminare l'incarnato.



## 7. Punto di forza di TOTAL ACTION REVOLUTION: **Pulizia profonda dell'epidermide**

Funzione: Corrente continua transdermica

Abbinando l'azione del manipolo con corrente continua transdermica al cosmetico specifico in dotazione, si ottiene la pulizia profonda dei tessuti, detta «Disincrostazione», grazie alla saponificazione dei grassi cutanei. Trattamento ideale per pelli miste grasse e pelli seborroiche.



## 8. Punto di forza di TOTAL ACTION REVOLUTION: **Rigenerazione epidermica** Manipolo: Micro dermoabrasione

L'azione meccanica del manipolo della micro dermoabrasione asporta lo strato superficiale dell'epidermide, favorendo il ricambio del tessuto trattato. Trattamento ideale per una pelle più luminosa, ossigenata e liscia.



## 9. Punto di forza di TOTAL ACTION REVOLUTION: **Ossigenazione tissutale profonda**

Funzione: Massaggio AirDren

L'azione del manipolo AirDren alterna aspirazione con una pausa, ciò permette la stimolazione dei tessuti e degli strati cutanei sia superficiali che profondi. Viene sfruttato il vuoto per provocare un vero e proprio massaggio locale, fondamentale per l'ossigenazione tissutale con effetto benefico sul microcircolo sanguigno e linfatico. Trattamento ideale per ottenere un tessuto più elastico, rimpolpato e tonico, oltre che il drenaggio dei liquidi in eccesso.



## 10. Punto di forza di TOTAL ACTION REVOLUTION: **Azione germicida e antisetica** Manipolo: Alta Frequenza

Con il manipolo Alta Frequenza si effettua l'applicazione della corrente ad alta frequenza con microcorrenti, ciò permette di ottenere azioni che, sommate tra loro:

- ✓ Purificano e migliorano le condizioni della pelle trattata.
- ✓ Ha un grande potere di penetrazione generando calore all'interno dei tessuti trattati.
- ✓ Stimolano i fibroblasti a produrre collagene, elastina e portano ad un miglioramento nella consistenza ed elasticità della pelle.
- ✓ Ha un'azione germicida, grazie alla formazione di ozono sulla superficie epidermica.



## 11. Punto di forza di TOTAL ACTION REVOLUTION: **Ripristino delle funzioni cutanee**

Manipolo: Microcurrent Lifting

Per ottenere il ripristino funzionale dei tessuti, i manipoli Microcurrent lifting erogano una corrente a bassa frequenza ed a bassa intensità, simulando gli impulsi nervosi fisiologici, ciò permette di ottenere le seguenti azioni:

- ✓ Stimola il microcircolo cutaneo, che aumenta il nutrimento e l'ossigenazione dei tessuti favorendone la rivitalizzazione, inoltre contribuisce alla stimolazione dei fibroblasti aumentando la quantità, la qualità di elastina e di collagene, da essi sintetizzati.
- ✓ Migliora il trofismo della pelle lavorando anche sulla tonicità muscolare.
- ✓ Effettua il drenaggio.
- ✓ Si ottiene un effetto Lifting.



## 12. Punto di forza di TOTAL ACTION REVOLUTION: La manualità dell'estetista e i servizi erogati in istituto

Con **TOTAL ACTION REVOLUTION** l'estetista mette in risalto la sua professionalità, ha la possibilità di effettuare infinite combinazioni di trattamenti grazie alle memory card, e di personalizzarli in base alle singole esigenze.

L'ampiezza dei trattamenti possibili consente i seguenti vantaggi:

- ✓ Aumentare i trattamenti specifici viso riducendo la stagionalità del lavoro in istituto, aumentando così gli incassi.
- ✓ Tantissimi trattamenti base personalizzabili e ampliabili in base alle esigenze di ogni singolo cliente.
- ✓ Consente l'uso di cosmetici specifici durante i trattamenti viso, garantendo così la migliore penetrazione e l'assimilazione nella pelle degli ingredienti funzionali attivi, ottenendo migliori risultati e clienti più soddisfatti.
- ✓ Si ottengono migliori risultati con meno sedute, ma incassando lo stesso importo.
- ✓ E' uno strumento indispensabile per trattamenti molto richiesti, ma difficilmente realizzabili, quali:
  - ✓ Il rimodellamento dell'ovale del viso.
  - ✓ L'anti Aging del décolleté.
  - ✓ La riduzione delle rughe d'espressione.
  - ✓ Il trattamento del contorno occhi.

L'alta qualità della tecnologia TOTAL ACTION REVOLUTION, ad un prezzo accessibile a tutte le clienti, lo rende accattivante.

euracom ha previsto condizioni di acquisto personalizzate per ogni esigenza dei clienti.

In questo periodo difficile per aiutare i centri estetici avete condizioni di pagamento agevolate per una maggiore serenità e tranquillità.